

Az AngelSounds egy mobil alkalmazás főként várandós nőknek. A magzati szívhang hallgatásával használva, a várandós anya megfigyelheti a baba szívének FHR értékét és görbéjét, valamint rögzítheti és lejátszhatja a magzati szívhangot, és feltöltheti az adatot a felhőbe, vagy megoszthatja családjával és barátaival.

Üzemeltetési útmutató

I Töltse le és telepítse az AngelSounds alkalmazást


Az APP használható iOS 7.0 vagy annál magasabb verzióval, és Android 4.3 vagy annál magasabb verzióval, és az alábbi módokon tölthető le.

1. Szkenelje be ezt a QR kódot



2. Töltse le az alábbi címről <http://image.jumper-health.com/inter.html>
3. iOS-nél, tölts le az AppStore-ból az "AngelSounds" kulcsszót használva a keresésnél
4. Android-nál, tölts le a Google Market-ről az "AngelSounds" kulcsszót használva a keresésnél




II Nyissa meg az alkalmazást

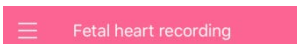

Please insert the headset
or open the bluetooth
Used to connect the device

III Csatlakoztassa a készüléket

1. Csatlakoztassa a készüléket az okostelefonhoz az átjátszó kábellel. (Dugja be az egyik végét a készülék csatlakozójába, a másikat pedig az okostelefon fülhallgató csatlakozójába). Miután csatlakoztatta, az alkalmazás automatikusan a szívhang rögzítésre kapcsol.

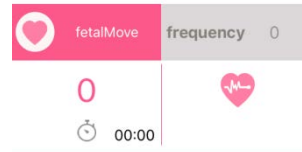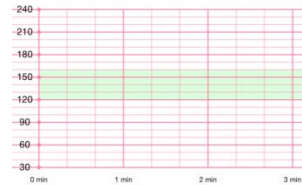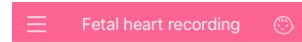

IV Bejelentkezés és belépés

1. Bejelentkezés
Kattintson a "☰" menu-re, válassza a "SETTINGS"-account"-t a menüben, kattintson a "regis" gombra és adja meg az e-mail címét és a jelszót a regisztrációhoz.

 Country



2. Belépés
Miután regisztrált, írja be az e-mail címét és a jelszót a belépéshez, vagy lépjen be más fiókot használva (pl. Facebook, vagy Twitter).






forgot password?



V Rögzítés

1. Találja meg a magzati szívhangot
Dugja be a fülhallgatót a készülékbe, tegye az érzékelőt a hasára és mozgassa míg megtalálja a tiszt szívhangot. A valós idejű szívritmus 5mp múlva megjelenik a kijelzőn.
2. Adatrögzítés

Amikor a szívhang stabil, kattintson a "▶" gombra az képernyő alján a felvétel elindításához. A szívritmus görbéje megjelenik a koordináta rendszerben. A magzati mozgás frekvencia rögzítéséhez (gyerek mód) kattinthat a "☑" gombra a felvétel alatt.

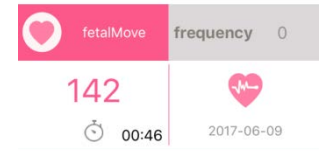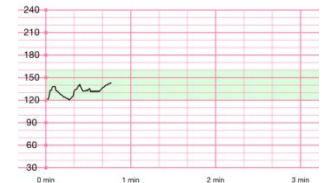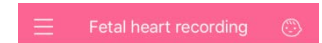

3. Adatmentés
A felvétel után, kattintson a "⊙" gombra a felvétel megállításához, majd kap egy kérdést, hogy menti-e az adatokat. Kattintson a "Confirm" -ra a mentéshez, vagy a "Cancel"-re a törléshez.

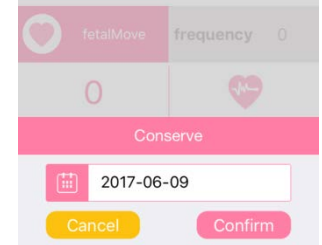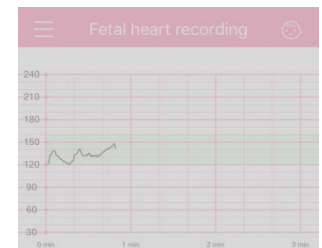


VI Felvétel ellenőrzése

1. Felvételek ellenőrzése

- 1) Minden mentés egy helyi listába kerül. Ezt bármikor ellenőrizheti, kattintson a "☰" menu –re a bal felső sarokban a képernyőn, ahogy ezt alább láthatja.



- 2) Kattintson a "TENDENCY CHART" –ra, hogy lássa az FHR és mozgás görbéket.
- 3) Kattintson a "RECORD" –ra, hogy belépjen a felvétel listába, nyomja meg és tartsa nyomva az egyik felvételt, megjelenik egy párbeszéd ablak, és törölheti a nem szükséges felvételt.

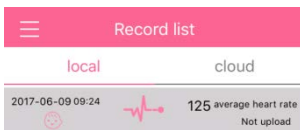

- 4) Kattintson a "↑" gombra, ha fel szeretné tölteni a felhőbe a felvételt, és így megmaradnak az adatok, ha másik okostelefonra vált.


2. Felvétel lejátszása

Kattintson az egyik felvételle, hogy belépjen a lejátszás menübe, és kattintson a Play gombra a lejátszásához. Csúsztassa a görbét jobbra vagy balra a lejátszási hely megváltoztatásához. Vagy kattintson a pause gombra a lejátszás szüneteltetéséhez.



3. Felvétel megosztása

Kattintson a share gombra "☰" a jobb felső sarokban, ha meg szeretné osztani a felvételt a "Facebook"-on vagy a "Twitter"-en. Megjegyzés: Először jelentkezzen be, mielőtt megosztja a felvételt.

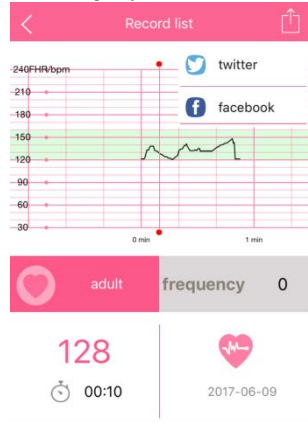


VII Baba információk

1. A baba heti változásai
Miatán bejelentkezett, állítsa be a várandósságának idejét és ellenőrizze a baba normál fejlődési állapotát.
2. Hogy találhatja meg a magzati szívhangot
Kattintson a "How to find the fetal heart" szövegre, ahol láthatja a megfelelő módokat.



VIII Beállítások

1. Alkalmazás frissítés
Kattintson az "update"-re a frissítés ellenőrzéséhez és a letöltéshez.
2. Emlékeztető
Kattintson az "ON/OFF" –ra az emlékeztető funkció kiválasztásához. Amikor a funkció engedélyezve van, akkor értesítéseket fog kapni.
3. Mód beállítások
Kattintson a "☰" gombra a "child/gyerek" és az "adult/felnőtt" mód közötti váltáshoz.
4. Visszajelzés
Írja le a problémákat ide és küldje el nekünk.
5. Nyelv
Jelenleg angol és japán nyelven elérhető.

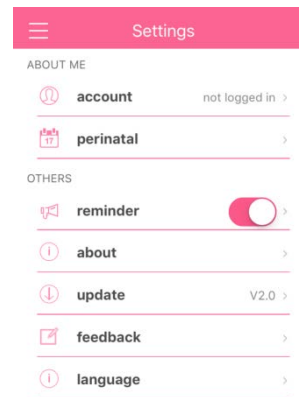

AngelSounds®

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd
Cím: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-26696279
Fax: +86-755-26852025
Web.: www.jumper-medical.com
E-mail: angelsounds.info@jumper-medical.com
Vevőszolgálat Magyarországon:
Angelstore Kft.
www.angelstore.hu
e-mail: info@angelsounds.hu